

### **Инструкция для участника проекта «Доктор Beurer»**

1. После прохождения регистрации в качестве участника: заполнение анкеты, оформление согласия на обработку персональных данных Вам предоставляется ссылка для передачи отчетов с диагностических приборов Beurer.
2. Используйте диагностические приборы Beurer, синхронизирующиеся с мобильными приложениями от Beurer (HealthManager, CardioExpert). ([Список приборов](#))
3. Скачать необходимое мобильное или ПК приложение

#### **HealthManager**

Ссылка для Android - [Скачать](#) (язык интерфейса - русский).

Ссылка для iOS - [Скачать](#) (язык интерфейса - русский).

Ссылка для ПК\* - [Скачать](#) (язык интерфейса - русский) либо войти в web-версию\*\* приложения по [ссылке](#).

\*ПК-персональный компьютер

\*\* Вход через сайт Beurer

Подробная инструкция по использованию приложения HealthManager по [ссылке](#)

или

#### **CardioExpert**

Ссылка для Android - [Скачать](#) (язык интерфейса - английский).

Ссылка для iOS - [Скачать](#) (язык интерфейса - английский).

Ссылка для ПК - [Скачать](#) (язык интерфейса - английский).

Подробная инструкция по использованию приложения CardioExpert по [ссылке](#)

4. Создайте свой профиль в скачанном приложении, заполняя все необходимые графы.
5. Добавьте диагностический прибор, следуя предлагаемым пунктам (проверьте, чтобы был включен Bluetooth на Вашем телефоне).
6. Проведите измерения прибором, и в случае успешной синхронизации, ваши диагностические показатели будут переданы в приложение через Bluetooth (в мобильном приложении), либо подключите Ваш прибор к ПК и передайте данные через USB-кабель, который идет в комплекте, вручную.
- 7.1. Чтобы передать Ваши диагностические показатели через **HealthManager** врачу-консультанту, существует 3 способа:
  - 1) *Мобильное приложение:* зайдите в настройки приложения HealthManager/Создать отчет/ Выберите временной интервал (с какого по какое число сформировать отчет, категорию показателей для отчета, формат файла отчета: PDF и нажимайте кнопку: «Отправить по электронной почте». Далее выберите вид способ пересылки (электронная почта: [drbeurer@beurer-belarus.by](mailto:drbeurer@beurer-belarus.by) отправляйте Ваш отчет)\*\*\*

- 2) ПК-приложение (если у Вас установлено мобильное приложение и установлена связь с прибором, то данные подтянутся из сервера *Beurer* через интернет): открыть Панель управления (значок спидометра)/Выбрать диагностический прибор (справа от значка «Панель управления»)/выбрать «Данные»/ Выбрать временной интервал для формирования отчета (Предшествующие «День», «Неделя» или «Год»)/ «Экспорт в Excel» /Выбрать место на жестком диске (выбрать или создать папку на компьютере) для сохранения отчетов/Сохранить. Затем полученный файл переслать по электронной почте врачу консультанту (адрес: [drbeurer@beurer-belarus.by](mailto:drbeurer@beurer-belarus.by))
- 3) Web-приложение: войти под своим логином и паролем на [сайте](#)/ выбрать «Измерение»/ «Экспорт данных»/ Установить необходимый временной промежуток/ Выбрать категории измерений (поставить галочки)/ Формат «Pdf»/ «Загрузить» / Выбрать место на жестком диске (выбрать или создать папку на компьютере) для сохранения отчетов/Сохранить. Затем полученный файл переслать по электронной почте врачу консультанту (адрес: [drbeurer@beurer-belarus.by](mailto:drbeurer@beurer-belarus.by))

\*\*\*Данные, полученные от участников проекта, будут перенесены на внутренний сервер, обработаны врачом-специалистом, а результаты расшифровки будут переданы Вам обратно.

7.2 Чтобы передать Ваши диагностические показатели через **Cardioexpert** врачу-консультанту через мобильное приложение, зайдите в меню/ выберите «Records» («Записи»)/ Выберите измерение, которое хотите отправить консультанту / Нажмите на значок конверта в правом верхнем углу\*\*\*\* / Выберите приложение, с помощью которого хотите отправить измерение  
\*\*\*\* - для прибора VM85 при отправке данных можно выбрать период: с определенного числа, за последний год, месяц, неделю.

*Координатор проекта – Ткачев Виталий Викторович, врач-терапевт 1-й квалификационной категории.*

#### **Контакты:**

Телефон: +375 29 383-61-83 (+Viber, WhatsApp, Telegram)

E-mail: [drbeurer@beurer-belarus.by](mailto:drbeurer@beurer-belarus.by)

Время для консультации: 16.00-18.00 по будням